

Cómo se usa su medidor de flujo máximo

Inserte las baterías AAA suministradas antes del primer uso del medidor de flujo máximo.



Párese o siéntese derecho y sostenga el medidor de flujo máximo frente a usted.


1

Mantenga presionado el botón azul de encendido hasta que la pantalla se encienda.




2

Aparecerá una línea de puntos en la pantalla.

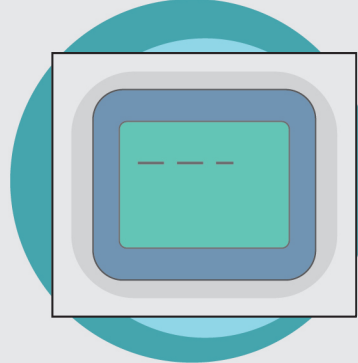

3

Luego aparecerá la palabra "go" en la pantalla.

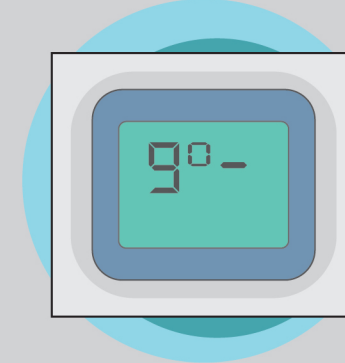

4

Inhale profundamente hasta llenar completamente los pulmones de aire.



5

Coloque la boquilla en la boca y selle bien con los labios.



6

Exhale con la mayor fuerza y rapidez posible a través de la boquilla.




7

El dispositivo mostrará sus lecturas en la pantalla.



8

Limpie el dispositivo con una toalla de papel o un paño suave.

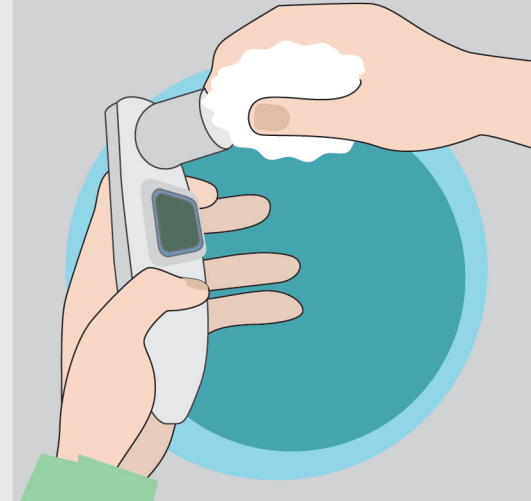

9