


Cómo usar su termómetro

Para cargar su dispositivo, conecte un extremo del cargador al puerto del dispositivo y el otro extremo al cargador de pared.

Enchufe el cargador de pared a la toma de corriente.


3-4 horas son suficientes para cargar su dispositivo.

Encienda el dispositivo con el interruptor.

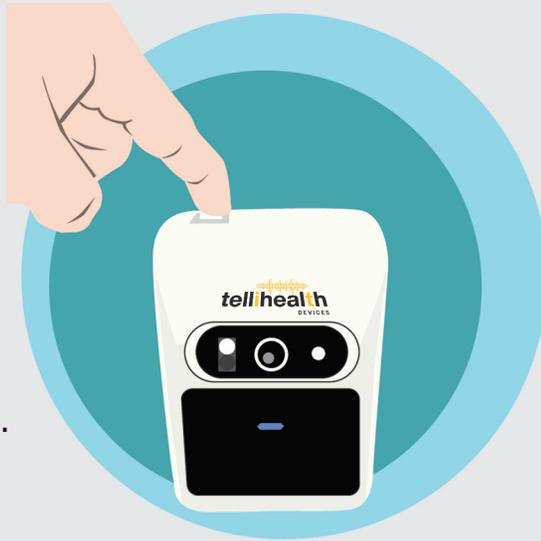

1

Sostenga el dispositivo paralelo a la frente (a 1-10 cm) hasta que vea una luz azul.

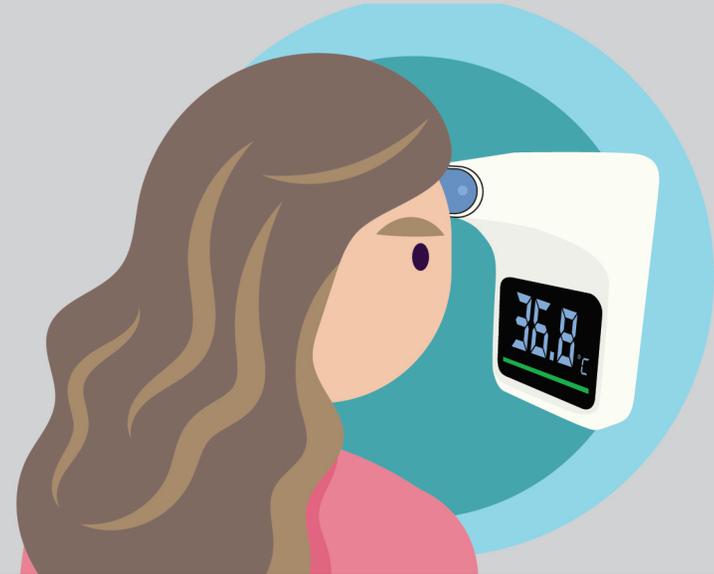

2

Cuando escuche un pitido largo, la medición habrá terminado. Aparecerá una barra giratoria y el dispositivo contará hasta 5.



3

Espere hasta que aparezca "PAS".



4